

器12 理学診療用器具
一般医療機器 温熱用パック (37240010)

アースメディカルカーフ

【禁忌・禁止】

以下の部位には使用しないでください。

(1) 感染部位

[血管拡張と血流増加が、炎症、かゆみ・かぶれを悪化させる恐れがあります。]

(2) 出血部位または出血の可能性がある部位

[血管拡張が出血の増大または出血をひき起こす恐れがあります。]

(3) その他医師が不適当と判断した部位**【形状・構造及び原理等】****1. 形状・構造**

原材料：ポリエステル（アースメディカルパウダー*を含む）、ポリウレタン

*アースメディカルパウダーは数種類の金属を含む微細粒子です。




サイズ表

	S	M	L	O
ふくらはぎ周	30~35	33~38	36~41	39~44


単位：cm

2. 原理

ポリエステル繊維に含まれるアースメディカルパウダーが、体熱の遠赤外線を輻射し、温熱治療を行う。

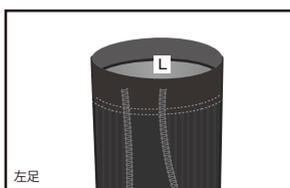【使用方法等】

①商品内側についているL-Rのマークを確認して、Lは左足、Rは右足に着用して下さい。(L-Rマークが後側になります。また、表面についているヒスネームが足の外側になるよう着用して下さい)

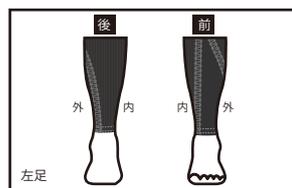

②はき位置を調整して着用完了

【使用目的または効果】

患部の消炎鎮痛処置（温熱治療）、血行の改善。
本品は再使用可能である。

【使用上の注意】

1. 治療中の方や下記に該当する場合は、必ず医師または専門家と相談の上ご使用ください。

- (1) 妊娠初期の不安定期または出産直後の方
- (2) 糖尿病等による高度な末梢循環障害および知覚障害のある方
- (3) 急性損傷や急性炎症が有る方
- (4) 血栓性静脈炎の疑いのある部位
- (5) 悪性腫瘍組織またはその周辺の部位
- (6) 局所性刺激製剤を使用した部位
- (7) 重度の浮腫が有る方
- (8) 体温が38℃以上の方
- (9) 血行促進作用のある薬を服用している場合

2. 他の治療器と同時に使用しないで下さい。

3. 使用中に異常を感じた場合には、直ちに使用を中止してください。

4. 患部に発疹、かゆみ、あかみなどが現れた場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。

5. しばらく使用して効果が現れない場合は、使用を中止してください。

6. 本品を改造しないでください。

【保管方法及び有効期間等】**1. 保管方法**

直射日光と高温多湿を避けて保管してください。

2. 有効期間

定めなし。

【保守・点検に関わる事項】

使用前の製品に異常が見られた場合は、使用せず、弊社の窓口までご連絡ください。お手入れの方法は洗濯絵表示にしたがってください。

【廃棄方法】

一般廃棄物として、市区町村の廃棄方法にしたがって処理してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売元：オンヨネ株式会社
住所：新潟県長岡市高見町4327番地
お問い合わせ先：0258-24-0048